

В резултат на своето филмообразуващо действие, възстановява здравината на венците и успокоява възпалените тъкани в устната кухина GENGIGEL® е медицинско изделие, осигуряващо оптимална адхезия (прилепване) към и защита на гингивалната лигавица. Неговите свойства произтичат от използването на различни полимери, калибрани да осигуряват отлични механични свойства и биосъвместимост. Неговият състав се характеризира с наличието на хиалуронова киселина с високо молекулно тегло (HMW), която е подобна на естествената хиалуронова киселина, намираща се в гингивалната тъкан. Хиалуроновата киселина с HMW е особено концентрирана в най-външните слоеве на здравата гингивална тъкан, където допринася както за бариерната функция, така и за якостта на опън на пародонталния лигамент. При пародонтално заболяване и други тъканни травми (възпалителни заболявания, гингивални джобове, рани и др.) потребността на тъканите от хиалуронова киселина се увеличава значително (с до около 200% в сравнение с основните стойности), като по този начин се доказва нейната полза за поддържане на здрави венци. Дефицитът на хиалуронова киселина, който възниква при тези състояния, пречи на тъканта да:

- възстанови нормалния баланс на свободната вода (като следствие от неговото нарушаване настъпва оток, а компресията причинява увеличаване на болката);
- активира на миграцията на фиброцитите (клетки, подпомагащи заздравяването на тъканите), вследствие на което процесът на заздравяване се забавя.

Следователно, липсата на подходяща хиалуронова киселина с HMW е причина възпалителното състояние да продължи. Клиничните проучвания показват, че наличието на екзогенна хиалуронова киселина с характеристики, подобни на тези на естествено срещания се компонент, подпомага улесняването на естествения процес на заздравяване и възстановяване на тъканите. Затова GENGIGEL® е иновативен продукт, осигуряващ дълго действаща, произведена по биотехнологичен път хиалуронова киселина с високо молекулно тегло. Прилагането на хиалуронова киселина осигурява периодонтална тъкан/флуиден баланс с подсилени оздравителни и възстановителни функции, като предотвратява дефицита на естествената гингивална хиалуронова киселина с HMW и повишава нейните ефекти. Хиалуроновата киселина не води до никакви локални или системни фармакологични ефекти върху лигавицата. GENGIGEL® осигурява максимална адхезия, като по този начин позволява на хиалуроновата киселина (която в противен случай би се елиминирала чрез постоянно слюноотделяне) да остане in situ. GENGIGEL® е изключително безопасен, няма противопоказания или нежелани реакции и може да се използва без ограничение от деца, бременни жени и възрастни хора. Профилът на безопасност на GENGIGEL® е особено подходящ, когато употребата на противовъзпалителни средства е противопоказана. Благодарение на своите свойства на ксилитола, естествен подсладител, който не причинява кариес или значими вариации в нивото на кръвната захар, продуктът може да е подходящ за диабетици. Не са известни лекарствени взаимодействия. **Показания:** възпалителни заболявания (гингивит, кървене на венците, отдръпване на венците, гингивални джобове) и други травматични състояния (по-специално язви в устата, рани, причинени от подвижни протези или ортодонтични приспособления, почистване, абразии, екстракции на зъби, след хирургично възстановяване и др.), и онези болестни състояния, при които гингивалната мукоза изисква повишени концентрации на хиалуронова киселина. **Инструкции за употреба:** след правилна хигиена на устната кухина, нанасяйте GENGIGEL® три до пет пъти дневно (след основните хранения) за 3–4 седмици, като продължете докато всички симптоми изчезнат. Препоръчително е да не се яде или пие поне 30 минути след прилагането. **Гел:** нанесете филм от гела върху венца, внимателно масажирайки с чисти пръсти, за да помогнете за правилното му разпределение по повърхността на лигавицата. **Вода за уста:** изплакнете с 10 ml (една доза) за 1–2 минути. Сместа е готова за употреба; не се разрежда. Включена е мерителна чашка. **Спрей:** всяко впръскване гарантира хомогенно, постоянно разпределение на течността върху повърхността на устната кухина; 1 или 2 впръсквания върху възпалена или травмирана тъкан. Дръжте бутилката във вертикално положение. Не са съобщавани проблеми при случайно поглъщане на продукта. **Противопоказания:** употребата на GENGIGEL® е противопоказана в случай на свръхчувствителност към някоя от съставките му. **Предпазни мерки и предупреждения:** не използвайте продукта, ако е видимо повреден. Да се съхранява при стайна температура, между 5°C и 40°C; защитете срещу директни източници на топлина. Да не се използва след изтичане на срока на годност. Преди да затворите контейнера след употреба, отстранете всички остатъци от продукта. Продукт само за лична употреба. Да се пази от достъпа на деца. Ако симптомите продължат, консултирайте се с медицински специалист.

Composition / Zusammensetzung / Összetétel: / Sestava / Sastav: / Състав / Состав /

Principal ingredient: / Hauptinhaltsstoffe: / Fő összetevő: / Glavna sestavina: / Glavni sastojak: / Основна съставка: / Главна съставка: /	Other ingredients: / Sonstige Inhaltsstoffe: / Egyéb összetevők: / Druge sastavine: / Ostali sastojci: / Други съставки:	It may contain
GEL Sodium Hyaluronate	Aqua, Xylitol, Cellulose Gum, Alcohol, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, Polyvinyl Alcohol, Carbomer (Polycarbophil), Dichlorobenzyl Alcohol, Aroma, Sodium Hydroxide, Acid Blue 9 (CI 42090).	Citric Acid
HYDROGEL-MOUTHRINSE Sodium Hyaluronate	Aqua, Xylitol, Alcohol, Polysorbate 20, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, Dichlorobenzyl Alcohol, Carbomer (Polycarbophil), Aroma, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Acid Blue 9 (CI 42090).	—
SPRAY Sodium Hyaluronate	Aqua, Xylitol, Alcohol, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium phosphate, Polyvinyl Alcohol, Aroma, Dichlorobenzyl Alcohol, Trisodium phosphate.	Citric Acid, Sodium Hydroxide



RICERFARMA s.r.l.

Via Egadi, 7 - 20144 Milano IT www.ricerfarma.com
Made in EU