



Gengigel® Prvi zobki je oralni gel, ki zaradi svoje inovativne sestave (patentirani mukoadezivni polimerni matriks), omogoča dolgotrajen oprijem zobkov in dlesni. Tvori neviden, fleksibilen in močan film za učinkovito zaščito dlesni.

Indikacije: vnetje dlesni, značilno za zgodnje otroštvo, ki nastane pri izraščanju zob ali kot posledica poškodb. Klinične študije kažejo, da nanos izdelka **Gengigel® Prvi zobki** olajša bolečino in otekanje ter pospešuje celjenje dlesni.

Navodila za uporabo: Roke temeljito umijte. S prstom razmažite majhno količino gela in ga nežno vtrite v dlesen, dokler prizadeto območje ni popolnoma prekrito. Priporočljivo je, da gel nanesete po obrokih in pred spanjem.

S tem spodbudite nastanek filma in pri otroku podaljšate občutek olajšanja bolečine. Uporabite od 3- do 6-krat na dan oziroma po potrebi.

Gengigel® Prvi zobki omogoča zmanjšanje uporabe zdravil, kot so lokalni anestetiki. Ima prijeten okus. Izdelek je brez alkohola in sladkorja. Ne vsebuje umetnih arom, parabenov in drugih konzervansov (natrijevega lavrilsulfata) ali gensko spremenjenih organizmov. Klinično preskušen za dojenčke.

Kontraindikacije: Izdelka **Gengigel® Prvi zobki** ne uporabljajte v primeru preobčutljivosti za katero koli sestavino.

Previdnostni ukrepi in opozorila: Izdelka ne uporabljajte, če je vidno poškodovan. Shranjujte pri sobni temperaturi od 5 °C do 40 °C, zaščitenega pred neposrednimi viri toplote. Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti. Po uporabi, preden vsebnik zaprete, odstranite vse ostanke izdelka. Izdelek je namenjen le osebni uporabi. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Če boste izdelek uporabili istočasno z drugimi izdelki, se o tem posvetujte z zdravnikom.

Composition: / Zusammensetzung: / Összetétel / Sestava / Sastav / Състав / Состав /

Principal ingredient: / Hauptinhaltsstoffe: / Fő összetevő: / Glavna sestavina: / Glavni sastojak: / Основна съставка: / Главна состојка: /

■ Sodium Hyaluronate

Other ingredients: / Sonstige Inhaltsstoffe: / Egyéb összetevők: / Druge sestavine: / Ostali sastojci: / Други съставки: / Други состојки: /

■ Aqua, PEG 400, Xylitol, Polyvinyl Alcohol, Cellulose Gum, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, PVP, PVM/MA copolymer, VP/Eicosene Copolymer, Glycerol Laurate, Carbomer (Polycarbophil), Sodium Saccharin, Sodium Phosphate, Glycerophosphocholine, Trisodium Phosphate, Sodium Lactate, Disodium EDTA.

It may contain ■ Lactic Acid, Sodium Hydroxide