

GENGIGEL®

first+aid

Перорална течност

Идеална за приложение върху рани и по време на следоперативната фаза.**Специално създадена, за да осигури лесно, бързо и ефикасно приложение.**

Хиалуоновата киселина с HMW е особено концентрирана в най-външните слоеве на здравата гингивална тъкан, където допринася както за бариерната функция, така и за якостта на опън на пародонталния лигамент. Счита се, че присъствието ѝ е необходимо за поддържането на здрава гингивална тъкан.

Хиалуоновата киселина има редица полезни свойства, които допринасят за успешната програма на заболяване и орална хигиена.

По-специално хиалуоновата киселина може да абсорбира до 50 пъти повече вода от собственото си сухо тегло.

Тази характеристика, заедно с молекулната ѝ конформация, когато е разтворена във водна среда, е причина хиалуоновата киселина да действа като много ефективна естествена бариера, предотвратяваща проникването на микроорганизми и други токсини, които е възможно да допринасят за етиологията на пародонтозата.

Благодарение на защитното си бариерно действие Gengigel® first+aid помага за намаляване на болката, подпомага естественото възстановяване на тъканите след травматични събития като хирургична процедура, поставяне на импланти, изваждане на зъби, кореново мащабиране и т.н. и подпомага абсорбцията на вода, като по този начин намалява отока и успокоява възпалителния процес.

Gengigel® first+aid

- Съдържа източник на хиалуонова киселина, извлечен от продукти от неживотински произход, произведен по биотехнологичен път, с високо качество, с висока чистота, под формата на натриева сол с високо молекулно тегло.
- Има дълготрайно локално действие.
- Прилепва към лигавицата поради специалната природа на състава на продукта.
- Може да се използва без ограничение от всички пациенти, включително деца, бременни жени, възрастни хора и диабетици.

Показания

С оглед на характеристиките си Gengigel® first+aid е специално предназначена за защита на лигавицата в случай на:

- дълбоки рани по венците
- възпалени и/или болезнени участъци след травми, хирургична или пародонтална процедура, изваждане на зъби или субгингивално кореново планиране.

Начин на употреба

Веднага след стоматологичното лечение изплакнете с 5 ml от продукта за 1-2 минути, като използвате мерителната чашка. След правилна хигиена на устната кухина повторяйте лечението 2-4 пъти на ден, освен ако не се препоръчва друго от медицинския специалист.

Сместа е готова за употреба; не разреждайте.

Състав

Основна съставка: Sodium Hyaluronate

Други съставки: Aqua, Peg-400, Xylitol, Propylene glycol, Peg-40 Hydrogenated castor oil, Cellulose gum, PVM/MA Copolymer, Polysorbate 20, Sodium benzoate, Dichlorobenzyl alcohol, Polyvinyl alcohol, Carbomer (Polycarbophil), Sodium phosphate, Trisodium phosphate, Sodium lactate, Disodium EDTA, Glycerophosphocholine, Aroma, Sodium saccharin, Acid Red 33 (CI 17200). (Може да съдържа Sodium hydroxyde, Lactic acid).

Опаковка

Gengigel® first+aid перорална течност 50 ml бутилка с включена мерителна чашка C € 0373.

Противопоказания: употребата на Gengigel® first+aid е противопоказана в случай на свръхчувствителност към някоя от съставките му.

Предпазни мерки и предупреждения: не използвайте продукта, ако е видимо повреден. Да се съхранява при стайна температура, между 5 °C и 40 °C; защитете срещу директни източници на топлина. Да не се използва след изтичане на срока на годност. Преди да затворите контейнера след употреба, отстранете всички остатъци от продукта. Продукт само за лична употреба. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Ако симптомите продължат, консултирайте се с медицински специалист.