



GENGIGEL®

Acid hialuronik

Si rezultat i veprimtarisë së tij cipë-formuese, rikthen shëndetin e mishrave të dhëmbëve dhe zbut indet e pezmatuara të gojës

GENGIGEL® është një produkt mjekësor që siguron adhezim optimal dhe mbrojtje të mukozës gingivale. Veçoritë e saj rrjedhin nga përdorimi i polimerëve të ndryshme, të kalibruara për të siguruar veçori të shkëlqyera mekanike dhe përputhshmërinë bio. Përbërja e tij karakterizohet nga prania e acidit hialuronik me peshë të lartë molekulare (HMW), e cila i ngjan acidit natyral hialuronik që gjendet në indet gingivale.

Acidi hialuronik HMW është i përqendruar sidomos në shtresat më të jashtme të indeve të shëndetshme gingivale, ku kontribuon si në funksionin pengues ashtu edhe në forcën rezistuese të ligamentit periodontal.

Në sëmundjet periodontale dhe traumat e indeve të tjera (kushtet inflamatorë, xhepa gingivale, plagët, etj.) kërkesa e indeve për acidin hialuronik rritet ndjeshëm (deri në rreth 200% krahasuar me vlerat bazë), duke demonstruar në këtë mënyrë vlerën e saj për mirëmbajtjen e mishrave të shëndetshme.

Mungesa e acidit hialuronik që lind në këto kushte e pengon indin që:

- të rivendosë baraspeshën normale të ujit të lirë (si pasojë e së cilës ënjtja dhe ngjeshja shkakton shtim të dhimbjes);
- të aktivizojë migrimin e fibrociteve (qelizat që kontribuojnë në shërimin e indeve), si pasojë e të cilit shërimi vonohet. Prandaj, mungesa e acidit të përshatshëm hialuronik HMW është faktor përgjegjës për vazhdimësinë e gjendjes inflamatorë.

Studimet klinike tregojnë se disponueshmëria e acidit hialuronik ekzogjen me karakteristika të ngjashme me ato të përbërës natyral ndihmon në lehtësimin e procesit të shërimit natyral të indeve dhe të rikuperimit.

GENGIGEL® është produkt inovativ që siguron acid hialuronik me peshë të lartë molekulare që ka efekt të gjatë veprues, dhe është prodhuar në mënyrë bioteknologjike. Aplikimi i acidit hialuronik siguron baraspeshë të indeve/lëngjeve periodontale me funksione të përshpejtuara shërimi dhe riparimi, duke parandaluar mungesën e acidit hialuronik HMW gingival natyror dhe duke forcuar efektet e tij. Acidi hialuronik nuk sjell ndonjë efekt farmakologjik lokal ose sistematik në mukozë.

GENGIGEL® siguron adhezion maksimal, duke e lejuar në këtë mënyrë acidin hialuronik (që në rast të kundërt do të eliminohej nga rrjedhja e vazhdueshme e pështymës) të mbetet në vendin e vet.

GENGIGEL® është jashtëzakonisht i sigurt, dhe nuk paraqet asnjë kundërlindim apo efekt anësor dhe mund të përdoret pa kufizime nga fëmijët, gratë shtatzëna dhe të moshuarit. Profili i sigurisë i GENGIGEL® ndihmon veçanërisht në rastet kur nuk këshillohet përdorimi i anti-inflamatorëve. Në sajë të vetive të ksilitolit, një ëmbësues natyral që nuk nxit prishjen e dhëmbëve apo nuk shkakton ndryshime të rëndësishme në nivelin e sheqerit në gjak, produkti mund të jetë i përshatshëm për diabetikët. Nuk njihet asnjë ndërveprim me bama të tjera.

Indikacionet: gjendje inflamatorë (gingivitis, gjakderdhje gingivale, tërheqje gingivale, xhepat gingival) dhe kushte të tjera traumatike (sidomos ulcerat në gojë, plagët e shkaktuara nga proteza që mund të hiqen ose pajisje ortodontike, pastrimi, abrazionet, heqja e dhëmbëve, rikuperimi pas një operacioni), dhe ato gjendje sëmundjeje ku mukozja gingivale kërkon përqendrim të larta të acidit hialuronik.

Udhëzime për përdorim: pasi keni siguruar higjienën e duhur orale, përdorni GENGIGEL® 3–5 herë në ditë (pas vakteve kryesore) për një periudhë prej 3–4 javësh, duke vazhduar deri sa të zhduken të gjitha simptomat. Këshillohet të mos hani apo të pini për të paktën 30 minuta pas aplikimit të tij.

Xhel: aplikoni një cipë xhel mbi mishërat e dhëmbëve, masazhoni butësisht me gishtat të pastër për ta shpërndarë në mënyrë sa më të rregullt në sipërfaqen e mukozës.

Ujë hidroshel për gojë: shpëlaj me 10 ml (një dozë) për 1–2 minuta. Përbërja është gatë për përdorim; mos e holloni. Kupa matëse 0373 është e përfshirë.

Spërkatës: çdo spërkatje garanton shpërndarje konstante dhe homogjene të lëngut në sipërfaqen e gojës; 1 ose 2 spërkatje në indin e pezmatuar ose indin e traumatizuar. Mbajeni shishen në pozicion vertikalisht.

Nuk është raportuar asnjë problem pas qëllitjes aksidentale të produktit.

Përbërja

Përbërësi kryesor: Sodium Hyaluronate

Përbërës të tjerë:

Xhel: Aqua, Xylitol, Cellulose Gum, Alcohol, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, Polyvinyl Alcohol, Carbomer (Polycarbophil), Dichlorobenzyl Alcohol, Aroma, Sodium Hydroxide, Acid Blue 9 (CI 42090) (It may contain Citric Acid).

Ujë hidroshel për gojë: Aqua, Xylitol, Alcohol, Polysorbate 20, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, Dichlorobenzyl Alcohol, Carbomer (Polycarbophil), Aroma, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Acid Blue 9 (CI 42090).

Spërkatës: Aqua, Xylitol, Alcohol, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium phosphate, Polyvinyl Alcohol, Aroma, Dichlorobenzyl Alcohol, Trisodium phosphate (It may contain Citric Acid, Sodium Hydroxide).

Kundërlindimet: përdorimi i Gengigel® nuk këshillohet të përdoret në rast të ndjeshmërisë së lartë ndaj ndonjërit prej përbërësve të tij.

Masa paraprake dhe paralajmërimi: mos e përdorni produktin nëse është dukshëm i dëmtuar.

Të ruhet në temperaturë dhome, midis 5 °C dhe 40 °C; dhe të mbrohet nga burimet e drejtpërdrejta të nxehtësisë.

Mos e përdorni pas datës së skadimit.

Para mbylljes së kontenitorit pas përdorimit, eliminoni të gjitha mbetjet e produktit. Produkti është vetëm për përdorim personal. Mbajeni larg fëmijëve.

Nëse simptomat vazhdojnë, konsultohuni me një profesionist të kujdesit shëndetësor.