

**GENGIGEL®****first+aid**

Class II b Medical Device

**Posebej oblikovan za zagotovitev enostavne, hitre in učinkovite uporabe
Idealan za nanos na rane in med pooperacijsko fazo**

Hialuronska kislina je fiziološko najpomembnejši proteoglikan, ki ga v naravi najdemo v sluzničnem zunajceličnem matriksu, kjer deluje skupaj z drugimi sestavinami vezivnega tkiva ter zagotavlja moč in prožnost, ki sta bistveni za zdravje ustne votline.

Hialuronska kislina ima veliko ugodnih lastnosti, ki prispevajo k uspešnemu čiščenju zob in higieni ustne votline.

Posebna lastnost hialuronske kisline je tudi, da lahko absorbira 50-krat večjo količino vode od lastne mase. Ta lastnost ji omogoča, da deluje kot pregrada pred vdorom mikroorganizmov in drugih toksinov, ki po vsej verjetnosti prispevajo k razvoju parodontalnih bolezni.

Gengigel® First-aid

- Vsebuje biotehnološko izdelano, visokokakovostno in zelo čisto hialuronsko kislino neživalskega izvora v obliki natrijeve soli.
- Ima dolgotrajno lokalno delovanje.
- Zaradi edinstvene sestave se Gengigel® First-aid oprime sluznice.
- Uporabljati ga smejo vsi ljudje brez omejitev, tudi otroci, nosečnice, starejši ljudje in sladkorni bolniki.

Indikacije

Gengigel® First-aid

- Lahko se uporablja na ranah sekundarne stopnje celjenja.
- Zmanjša bolečino in nelagodje, še posebej po travmatskih stanjih, kirurških ali parodontalnih posegih, vsadkih, puljenju zob, luščenju in glajenju zobnih korenin.
- Spodbuja in pospešuje antiedematozni in protivnetni proces.

Navodila za uporabo

Takoj po posegu spirajte ustno votlino s 5 ml peroralne tekočine (en odmerni lonček) 1–2 minuti.

Postopek ponovite po pravilni ustni higieni 2 do 4-krat na dan, razen če vam zobozdravnik svetuje drugače.

Tekočina je pripravljena za takojšnjo uporabo; ne razredčujte.

Pakiranje

Gengigel® First-aid 50 ml steklenička z odmernim lončkom.

Opozorila

Pri dokazani preobčutljivosti na sestavine izdelka uporaba ni priporočljiva.
Shranjujte pri temperaturi med 5°C in 40°C.